



# スマートフォンでInBodyの測定結果が管理できます。

まずは InBody アプリをダウンロードしてください。



**InBody(無料)**

Google Playストア、または App Storeでアプリケーションをダウンロードできます。



アプリのダウンロード  
【iOS版】



アプリのダウンロード  
【Android版】

< 対応 OS >

○iPhone: iOS8.0 以上

○Android: 4.3 以上

※タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。

※通信環境がない場所ではアプリケーションを起動することができません。

# ダウンロード完了後にInBodyアプリを起動して、新規登録を行ってください。




① InBodyアプリを起動し、携帯番号を入力してください。




② メールアドレス・性別・身長・年齢・パスワードを入力してください。



③ 製品設定画面の一番下にある「なし」を選択してください。

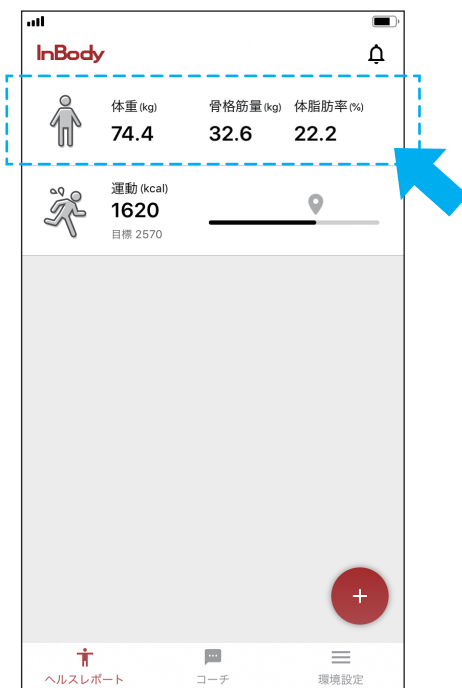

④ 設定完了後、破線部分を選択してください。

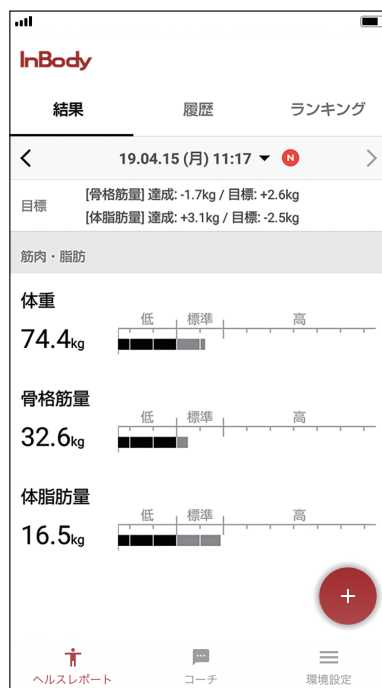

⑤ 測定結果が棒グラフで表示されます。また、画面最下段の「InBody結果用紙閲覧」を選択すると、InBodyから印刷される結果用紙の形式で確認することができます。

